

 **RSkin**<sup>\*</sup>®  
B L U E


A BLUEtiful Laser

by  **Rlight**  
LASER



# NOVEDOSO LASER TRANSDÉRMICO PORTÁTIL PARA ELIMINAR LESIONES VASCULARES Y PIGMENTARIAS

DE USO EXCLUSIVO MÉDICO

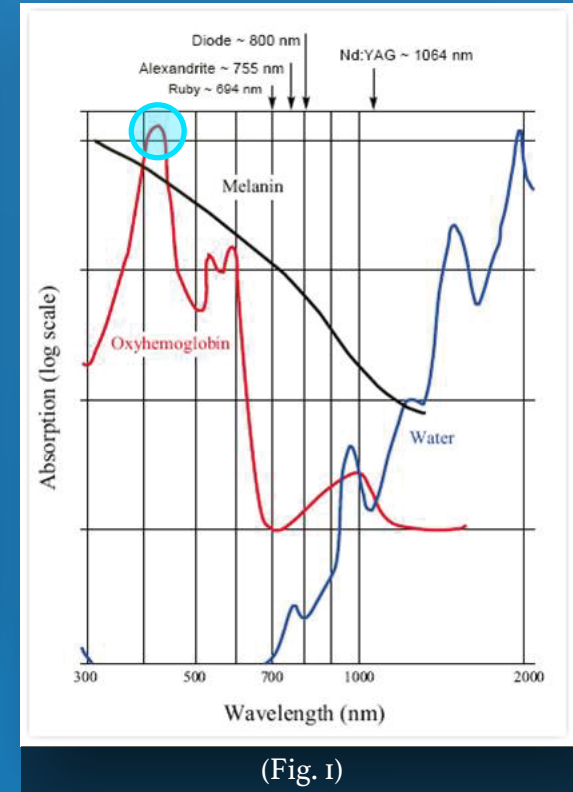

## ¿Por qué elegimos el Laser Azul?

El pico más alto de absorción de la Hemoglobina (Hb) se encuentra entre 400-450nm de longitud de onda (Fig. 1)\*El ORskin Blue , un Diodo Laser de GaN (Nitruro de Galio) 445nm, se encuentra en el rango óptico ideal para el tratamiento de lesiones superficiales con alto contenido de Hemoglobina y/o melanina, permitiendo la utilización de potencias menores, optimizando los recursos. Estas propiedades físicas del ORskin Blue, nos permiten utilizar una Fluencia (Energía aplicada sobre un área determinada) ideal según la bibliografía autorizada en el tratamiento de este tipo de lesiones con Laser de luz visible.



- Es un LASER ergonómico, operado a batería recargable.
  - Prácticamente indoloro para el/la paciente.
  - NO utiliza material descartable ni consumibles, razón por la cual lo convierte en un producto amigable con el cuidado del medio ambiente.
-

## APLICACIONES VASCULARES:

- TELANGIECTASIAS (EN ROSTRO Y PIERNAS)
- NEVOS RUBÍ
- ROSÁCEA
- ANGIOMAS



## APLICACIONES PIGMENTARIAS Y OTRAS:

- QUERATOSIS
- LÉNTIGOS SOLARES Y SENILES
- CONDILOMAS
- ACNÉ ACTIVO
- MANCHAS CAFÉ AU LAIT

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PESO	300 grs
DIMENSIONES	20 cms x 20,5 cms / ancho x alto
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS	Batería recargable 11.1 V y 2600 mA/h
ENFRIAMIENTO	AIRE FORZADO
LONGITUD DE ONDA	445 nm
POTENCIA	0.10 a 3 Watts
FLUENCIA	1.25 - 40 J/cm <sup>2</sup>
MODO DE PULSO	Modo Continuo
	Modo Pulsado 1 / 2 / 4 / 8 Hz
DURACIÓN DEL PULSO	25 / 50 / 75 / 100 ms
SPOT SIZE	Elíptico 0.5x1mm
HAZ DE GUÍA LÁSER ROJO 630nm	Intensidad variable
Indicado para fototipos I, II, III	

INDUSTRIA ARGENTINA  
OFRECEMOS GARANTÍA DE FÁBRICA, SERVICIO POSVENTA  
Y ATENCIÓN PERSONALIZADA A CADA CLIENTE

Tel: +54 11 4788-0070 / Whatsapp: +54 11 5063-6524  
Mail: [info@orlightlaser.com](mailto:info@orlightlaser.com)  
MONROE 1623 5to A, Buenos Aires, Argentina

